


Phönix DVD-Viewer öffnen und bedienen:

Der Phönix Viewer kann beliebig für MAC und PC benutzt werden.


Nachdem die DVD in MAC / PC hineingeschoben wurde, kann im Grundverzeichnis der DVD der Viewer gestartet werden.

Bildbetrachter starten:

Für PC (Windows): Doppelklick auf viewer.exe

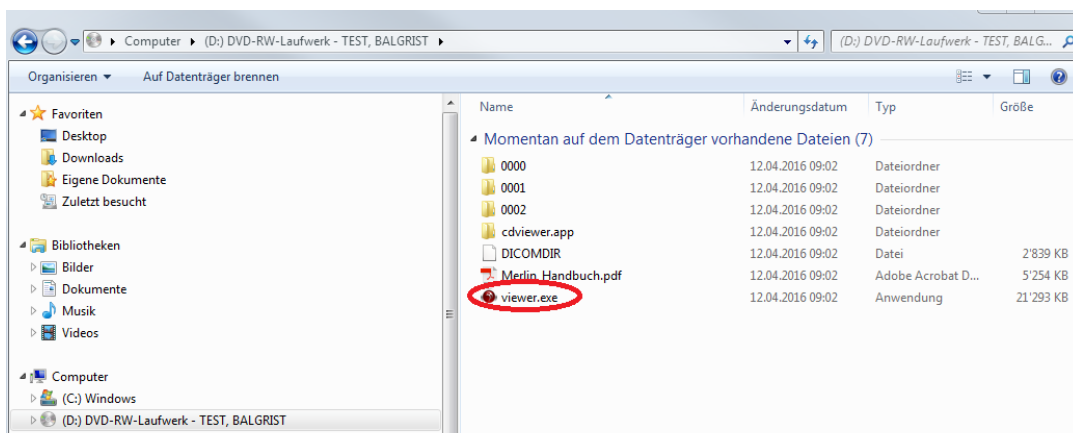

Für MAC: Doppelklick auf cd.viewer.app

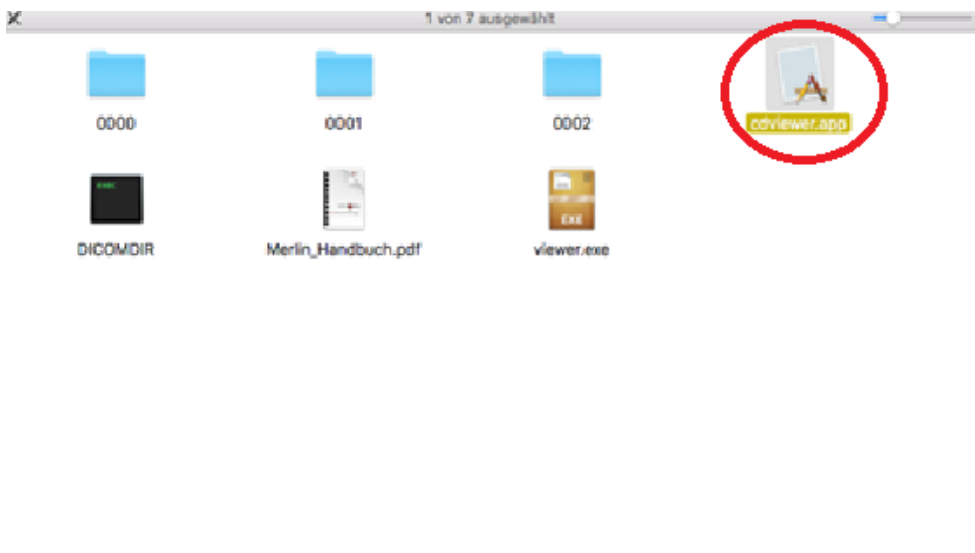


Untersuchung laden:

Die erste Untersuchung wird automatisch dargestellt.

Zwischen den Untersuchungen wechseln:

Die Untersuchung kann gewechselt werden indem man auf die Zeile der Untersuchung doppelklickt.

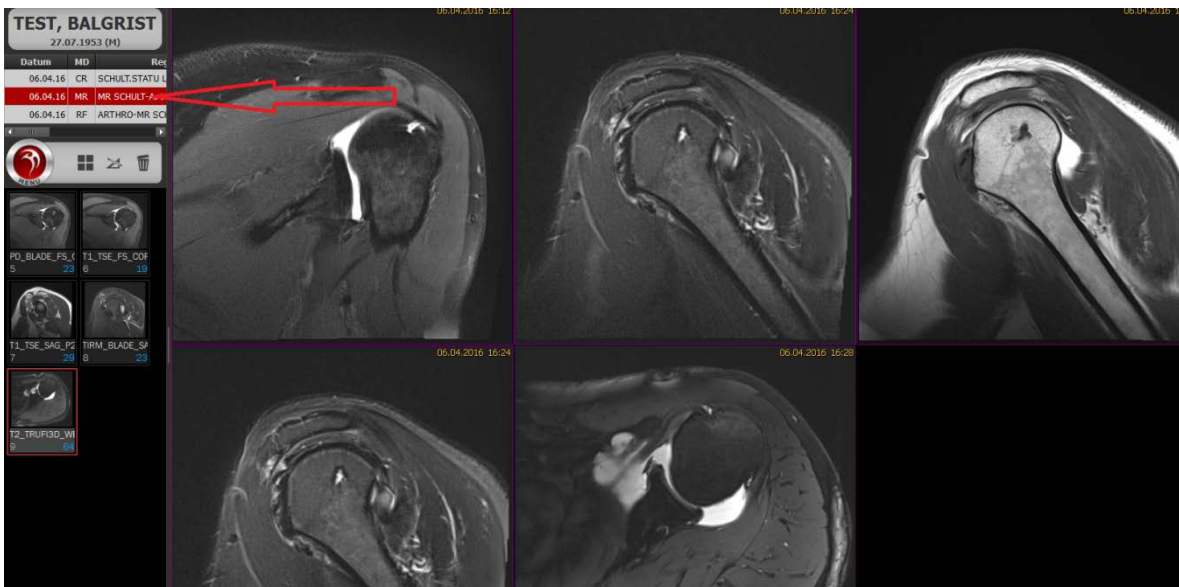

Die Aufteilung ändern:

Die Aufteilung kann mit gedrückter linker Maustaste auf unten dargestelltes Icon selber bestimmt werden.

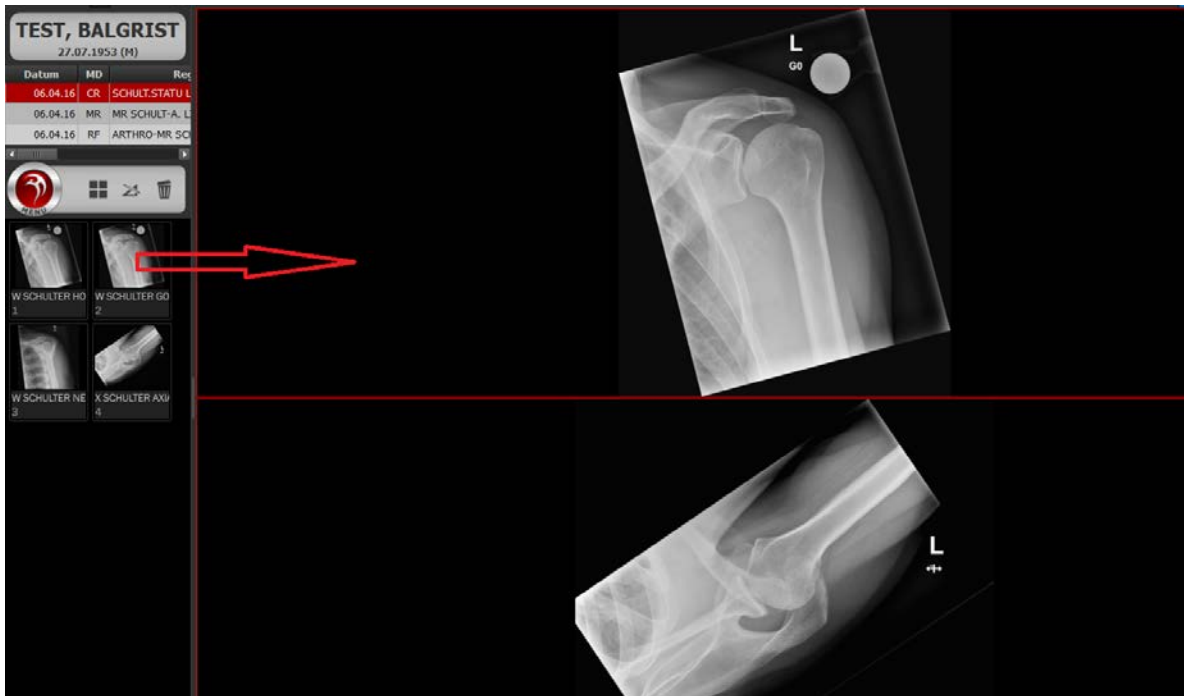


Bild im vollen Format zeigen:

Mit einem Doppelklick in das Bild oder die Serie wird das Bild einzeln dargestellt. Mit der mittleren Maustaste kann zwischen den Bildern / Serie gescrollt werden.


Anderes Bild/ Serie laden:

Die linke Maustaste halten und das Bild nach rechts ziehen.




Werkzeuge abrufen:

Auf das Icon klicken und rechts das Werkzeug anwählen (Länge, Winkel messen)

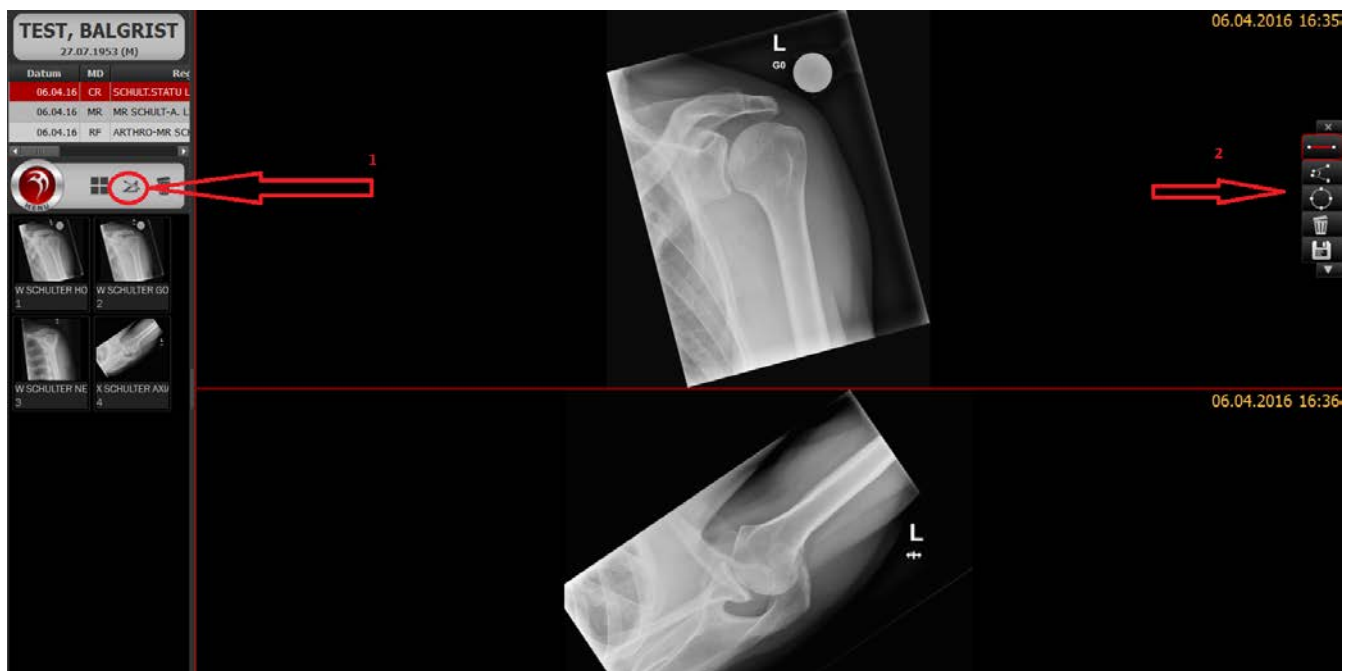


Referenzlinie abrufen (MR, CT):

Die Taste K drücken:

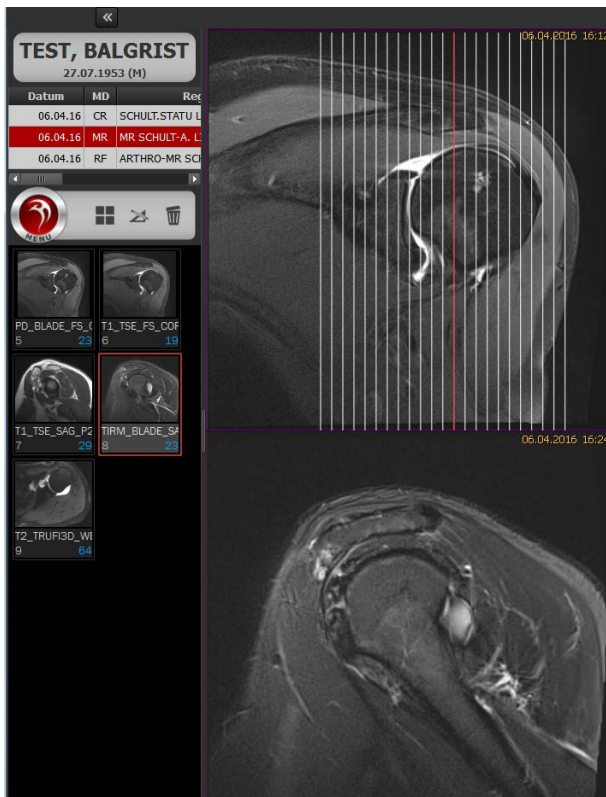

Ein Bild / Serie vergrössern/verkleinern:

Die rechte Maustaste gedrückt halten und im Bild nach oben/ unten ziehen

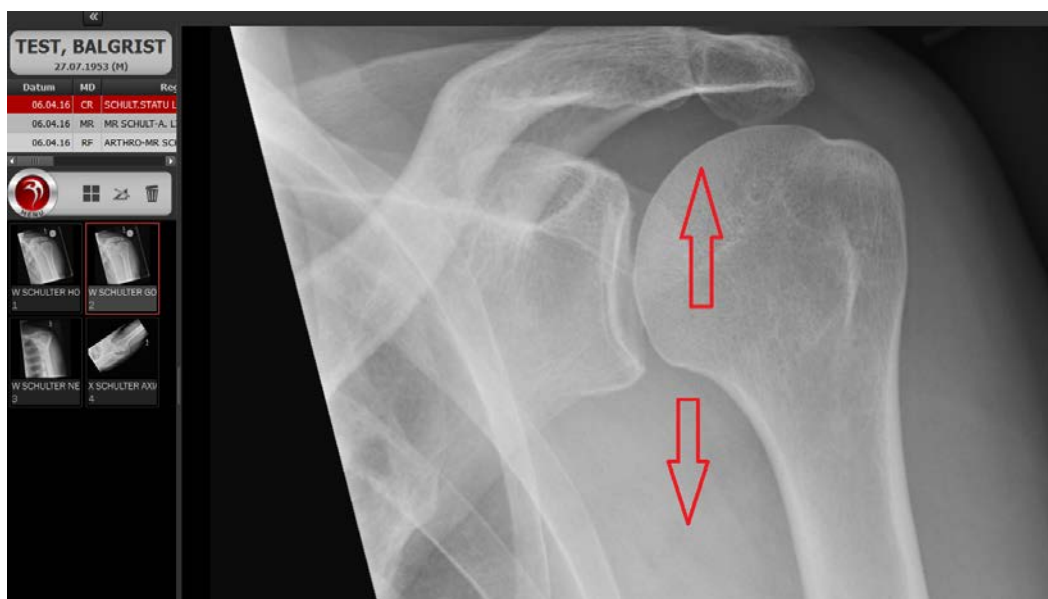

Papierausdruck abrufen:

Das Menu öffnen, auf „Drucken“ klicken, die Einstellungen für den Ausdruck erscheinen rechts.



Handbuch:

Das gesamte Handbuch ist auf der DVD gespeichert, Sie finden es im Grundverzeichnis oder auf unserer Internetseite: <http://www.balgrist.ch/Home/Weitere-Kompetenzen/Radiologie/Patienten-Info.aspx>